



hemoCARE

تست اسلاید سه حفره ای (Modified Guaiac)

برای تشخیص خون مخفی در مدفوع



نگهداری و تاریخ انقضا

اسلایدهای hemoCARE و محلول توسعه دهنده در دمای 28°C - 4°C و دور از نور و حرارت نگهداری شود. بعد از پایان تاریخ انقضا استفاده نگردد.

قبل و در طول نمونه گیری

این تست، پزشک را قادر می سازد تا خون مخفی را در مدفوع شناسایی نماید. به منظور آشکار شدن زخمهای مخفی، پیشنهاد می گردد نکات زیر از ۳ روز قبل و در طول مدت انجام آزمایش برای دستیابی به نتایج دقیق تر رعایت گردد:

- عدم مصرف گوشت یا سوسیس خام و نیم پز، زیرا مواد غذایی حاوی خون می توانند منجر به نتایج مثبت کاذب گردند، حتی اگر هیچ خونریزی روده ای وجود نداشته باشد.
- عدم مصرف مکمل های ویتامینی غنی از اسید اسکوربیک (ویتامین C) بیش از 1000 mg در روز
- عدم مصرف داروهای آسپرین، ایندومتاسین، فنیل بوتازون، کورتیکواستروئیدها، رزپین و مانند آن
- عدم مصرف قرص های آهن، مولتی ویتامین و یا مانند آن در طول دوره آزمایش
- یک رژیم غذایی سرشار از فیبر مانند نان کامل، آجیل، سبزیجات مخصوصا اسفناج، سالاد و همچنین میوه های تازه (مخصوصا آلو، انگور یا سیب) پیشنهاد می گردد.

هشدار و احتیاط

- قبل از استفاده، دستورالعمل ها را به دقت مطالعه نمایید.
- از هر اسلاید تنها یک بار و برای یک بیمار استفاده شود.
- بعد از پایان تاریخ انقضا استفاده نشود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تهران، خیابان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۱۵، واحد ۲

کدپستی: ۱۴۵۷۸۷۴۴۹۴

تلفن: ۰۱۰۶۶۱۲۴۰۸۰ فاکس: ۰۱۰۶۶۱۲۴۰۸۱

- نمونه مورد استفاده مدفوع می باشد.
- اسلایدها تنها پس از خشک شدن نمونه مدفوع قابل ارزیابی می باشند. نمونه های مرطوب مدفوع و نمونه هایی که بیشتر از ۱۲ روز از اجابت آن می گذرد، منجر به کاهش حساسیت تست می گردد.
- دستها، دستکش ها و محیط کار می بایست عاری از خون باشد.
- تست نباید در هنگام خونریزی در شرایط دیگر مانند هموروئید، یبوست، خونریزی قاعدگی یا پس از جراحی دندان، انجام گردد.

آماده سازی و دستورالعمل استفاده

نکته بسیار مهم:


از هر اسلاید تنها برای یک بیمار استفاده گردد.

نمونه گیری می بایست از سه جای مختلف یک نمونه، طبق دستورالعمل زیر انجام گیرد:

۱. اسلاید را از قسمت جلو ("PATIENT - open here") باز کنید.



۲. برای هر یک از خانه های A و B و C اسلاید، هر بار با یک اپلیکاتور مقوایی جدید، و از قسمت های مختلف مدفوع، یک نمونه کوچک برداشته و یک لایه بسیار نازک روی خانه مربوطه اسلاید بمالید.

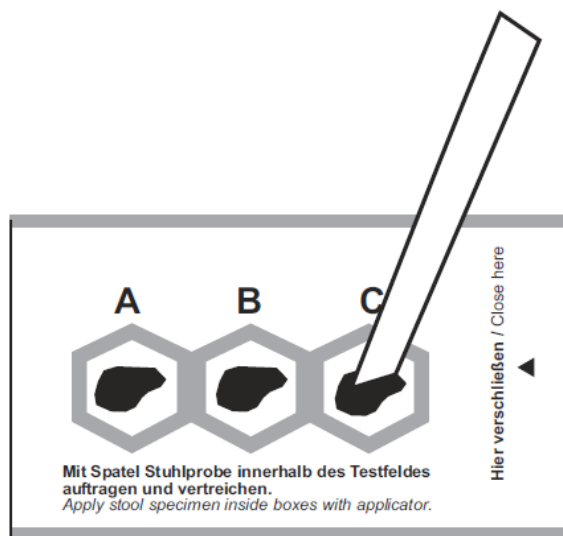

۳. درپوش اسلاید را بعد از خشک شدن نمونه ببندید. اسلایدها می بایست دور از نور و حرارت نگهداری گردند.

۴. در اسلاید را از قسمت پشت ("To be opened BY PHYSICIAN ONLY") باز کنید.

NAME	DATUM
NAME	DATE
<p>Anweisungen für den Arzt: Instructions to the physician:</p> <p>1-2 Tropfen Entwicklerlösung direkt auf jede Stuhlprobe tropfen. Ergebnis innerhalb von 30 bis 120 Sekunden ablesen.</p> <p>Apply 1-2 drops of developer directly over each stool specimen. Read results between 30 and 120 seconds.</p> <p>Hier NUR VOM ARZT zu öffnen To be opened BY PHYSICIAN ONLY</p>	
ADRESSE	Lot
ADRESSE	

۵. یک تا دو قطره از محلول توسعه دهنده hemoCARE بر روی نمونه های خشک شده مدفوع بریزید.

۶. نتایج را بعد از ۳۰ ثانیه تا ۲ دقیقه بخوانید.

نکته: هرگز نتایج تست را نزدیک به پنجره باز، نخوانید.

هر اثری از توسعه رنگ آبی که ۳۰ ثانیه تا ۲ دقیقه بعد از استفاده از محلول توسعه دهنده به نمونه مدفوع خشک شده قابل تشخیص باشد به عنوان تست مثبت برای خون مخفی در مدفوع تلقی گردیده و می بایست دلیل خونریزی روده تشخیص داده شود.

عدم تغییر به رنگ آبی می بایست به عنوان تست منفی برای خون مخفی در مدفوع تلقی شود.



نتیجه تست منفی



نتیجه تست مثبت