

روش اجرایی (Documented Procedure)

عنوان روش اجرایی : نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل به کار رفته برای بیمار	کد سند : PRO-IC-2
تاریخ تدوین : 95/8/10	تاریخ ابلاغ : آذر ماه 1401
تاریخ بازنگری : آبان ماه 1401	شماره ویرایش : پنجم

شیوه انجام کار : (ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان با ذکر مسئول انجام هر سطح)

- 1- پرسنل CSR قبل از بسته بندی و استریل نمودن وسایل و لوازم داخل ست ها و بسته ها و پک های اندیکاتور شیمیایی قرار می دهند.
(برای بسته ها یا پکهای کمتر از 12 قلم اندیکاتور کلاس 4 و برای بسته ها و پکهای استریل بیش از 12 قلم اندیکاتور کلاس 6)
- 2- پرسنل CSR بروی هر بسته یا پک که قرار است استریل شود برچسبی که حاوی مشخصات ست ، شیفت کاری، تاریخ استریل و انقضاء ، شماره دستگاه، شماره چرخه استریل، کد کاربر می باشد را می چسبانند. (کلاس 6) که پس از انجام جراحی یا انجام پروسیجر سیستم رهگیری جهت ست های استریل ایجاد می شود.
- 3- پرستار در بخش ها یا سیرکولرهای اتاق عمل و کاردانان و کارشناسان بیهوشی برچسب مشخصات روی کلیه ستها و بسته های استریل و نشانگر های شیمیایی داخل بسته ها و پک ها و لوازم استریل را پس از استفاده در فرم مخصوص چسبانده و در پرونده بیمار قرار می دهند.
- 4- کلیه وسایل و لوازم و تجهیزات استریل که توسط شرکت های تولید کننده استریل شده اند نیز دارای برچسب و تاریخ استریل و انقضاء می باشند . پرستار یا سیرکولر یا کادر هوشبری این برچسب ها را پس از استفاده در فرم مخصوص می چسبانند.
- (در صورتی که نیاز به رهگیری وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته برای بیمار باشد با مراجعه به پرونده بیمار و مطالعه برگه مخصوص نشانگر های شیمیایی این اطلاعات بدست خواهد آمد)
- 5- بر عملکرد صحیح کاربر نظارت می گردد (تطابق عملکرد) در صورت عدم تطابق عملکرد کاربر اقدامات اصلاحی نظیر آموزش و صلاحیت بکارگیری کاربر در آن محل بررسی می گردد.

منابع : تجربیات بیمارستان

امکانات مرتبط: نشانگر های شیمیایی - برچسب

نام و نام خانوادگی و سمت تصویب کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کننده /تهیه کنندگان :
دکتر امیراحمد عرب زاده : رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل	فرشید امیری : مسئول بخش استریلیزاسیون	فرشید امیری مسئول CSR
		رامین رونقی مدیر خدمات پرستاری
		فریبا ساقی سرپرستار بخش ICUOH
		رباب عظیم زاده کارشناس کنترل عفونت
		لطفعلی میزایی متصدی CSR
		شهرین شیفته سوپروایزر بالینی
		فاضل اکبری سرپرستار اتاق عمل
		خورشید رفیعی سرپرستار کت لب
		مدینه رضوانپور سرپرستار بخش کاردیوتوراکس