

دستورالعمل (Instruction)

عنوان دستورالعمل : کنترل کیفی AHG			
کد سند : INS-BT-4			
تاریخ تدوین : 95/8/10	تاریخ ابلاغ : آذر ماه 1401	تاریخ بازنگری : آبان ماه 1401	شماره ویرایش : پنجم

گامهای دقیق انجام عملیات (حالت افعال به کار برده شده امری (دوم شخص جمع) باشد جملات ساده - کوتاه - مختصر) :

- 1 - پک سل تهیه شده از سازمان انتقال خون که در یخچال بانک خون موجود است را بردارید.
 - 2 - بعد از شیک کردن پک سل در یک لوله آزمایش 4 قطره و یا 200 لانداز آن را بریزید و بر روی آن دو قطره از آنتی هیومن را اضافه نمایید و سپس لوله را بمدت 30-60 سانتریفوژ کنید .
 - 3 - باید درجه آگلوتیناسیون بصورت 3-4 مثبت دیده شود .
لوله کنترل :
 - 1 - در یک لوله آزمایش دو قطره البومین گاوی 22 درصد و 4 قطره و یا 200 لانداز پک سل بریزید و سپس آنرا بمدت 30-60 سانتریفوژ نمایید . نتیجه باید بصورت عدم آگلوتیناسیون مشاهده شود .
 - 2 - هر گونه واکنش اضافه دال بر استاندارد نبودن آنتی هیومن می باشد .
توجه :
- آنتی هیومن از نظر ظاهری باید شفاف باشد و عدم شفافیت آن نشان دهنده آلودگی آن می باشد.

منابع: دستورالعمل سازمان انتقال خون

امکانات مرتبط : پک سل ، آنتی هیومن گلبولین ، لوله آزمایش، سانتریفوژ

کارکنان مرتبط : کارکنان بانک خون

نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان :				
نام و نام خانوادگی و سمت تصویب کننده :		نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده :		
دکتر امیراحمد عرب زاده رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه	یعقوب ابراهیم خلیلی کارشناس آزمایشگاه	مهسا اقدمی کارشناس آزمایشگاه	محمد حسین آقاجانی مسئول آزمایشگاه
				دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه