

دستورالعمل (Instruction)

عنوان دستورالعمل : معیار های رد نمونه			کد سند : INS-BT-7
تاریخ تدوین : 95/8/10	تاریخ ابلاغ : آذر ماه 1401	تاریخ بازنگری : آبان ماه 1401	شماره ویرایش : پنجم

گامهای دقیق انجام عملیات (حالت افعال به کار برده شده امری (دوم شخص جمع) باشد جملات ساده - کوتاه - مختصر) :

معیار رد نمونه در بانک خون

- ✖ عدم وجود شناسه های بیمار روی ظرف نمونه
- ✖ عدم همخوانی مشخصات بیمار روی برگه درخواست با اطلاعات روی ظرف نمونه
- ✖ شکستگی ظروف حاوی نمونه
- ✖ نشد نمونه از داخل ظروف
- ✖ حجم کم نمونه
- ✖ گذشت مدت زمان مجاز، از زمان نمونه گیری تا تحویل نمونه به آزمایشگاه
- ✖ انتقال نمونه در نگهدارنده نامناسب
- ✖ انتقال نمونه در شرایط دمایی نامناسب
- ✖ عدم رعایت شرایط مربوط به آمادگی بیمار قبل از نمونه گیری

***به طور معمول مدت زمان نگه داری نمونه برای انجام کراس میچ 7 روز می باشد که در صورت سابقه بارداری و یا تزریق خون در سه ماه گذشته به 3 روز کاهش می یابد.

منابع: دستورالعمل سازمان انتقال خون

امکانات مرتبط : ظرف مناسب برای حمل نمونه ، یخ خشک جهت شرایط دمایی

کارکنان مرتبط : کارکنان بانک خون

نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان :					نام و نام خانوادگی و سمت تصویب کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده :
محمد حسین آقاجانی مسئول آزمایشگاه	مهسا اقدمی کارشناس آزمایشگاه	یعقوب ابراهیم خلیلی کارشناس آزمایشگاه			دکتر امیراحمد عرب زاده رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه
دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه						