

دستورالعمل (Instruction)

کد سند : INS-LAB-16	عنوان دستورالعمل : نحوه کنترل کیفیت انجام آزمایش های مختلف در بخش هماتولوژی و بخش انعقاد، در همه نوبت های کاری و تفسیر نتایج آن ها		
شماره ویرایش : پنجم	تاریخ بازنگری : آبان ماه 1401	تاریخ ابلاغ : آذر ماه 1401	تاریخ تدوین : 95/8/10

گامهای دقیق انجام عملیات (حالت افعال به کار برده شده امری (دوم شخص جمع) باشد جملات ساده - کوتاه - مختصر) :

بخش هماتولوژی :

کنترل کیفی در تمامی شیفتها و ران کاری باید انجام شود .

- 1- ابتدا دستگاههای Sysmex XT 1800i-Sysmex KX21N, توسط کالیبراتورهای شرکت پشتیبان کالیبر شود .
- 2- خون کنترلهای معتبرا طبق دستورالعمل شرکت سازنده 15 دقیقه در دمای اتاق قرار دهید .
- 3- دستگاه را روشن کرده ، عملیتهای شستشو را انجام داده ، خون کنترل را پس از وارد کردن شماره به دستگاه مانند نمونه بیمار به دستگاه بدهید .
- 4- پس از اتمام کار و آماده شدن جوابهای کنترل ، نتایج را در نمودار مربوطه قرار داده و با استفاده از قوانین وستگارد تفسیر کنید .

بخش انعقاد :

- 1- ویال حاوی کنترل را طبق دستورالعمل شرکت سازنده آماده و جهت استفاده به دمای 37 درجه برسانید .
- 2- ویالهای آزمایش PT-PTT نیز آماده کرده و مقدار مورد نیاز از هرکدام داخل لوله های آزمایش بریزید و داخل بن ماری قرار داده دهید .
- 3- آزمایش را طبق SOP مربوطه انجام داده و در برگه مخصوص ثبت و بایگانی کنید .
- 5- در صورتی که طبق قوانین وستگارد مشکلی وجود داشته باشد طبق SOP مربوطه عمل کرده و تا حذف اشکال و تنظیم دستگاه ادامه دهید .
- 6- نتایج کنترل را در برگه مخصوص ثبت و بایگانی کنید .

منابع : تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی دکتر محمدرضا عابدی

امکانات مرتبط : دستگاههای Sysmex XT 1800i-Sysmex KX21N, خون کنترل

کارکنان مرتبط : هماتولوژی

نام و نام خانوادگی و سمت تصویب کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان :		
دکتر امیراحمد عرب زاده رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه	سولماز قلی زاده کارشناس آزمایشگاه	محمد حسین آقاجانی مسئول آزمایشگاه	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه
				ناهدید ارژنگی کارشناس آزمایشگاه