

دستورالعمل (Instruction)

کد سند : INS-LAB-14	عنوان دستورالعمل : نحوه کنترل کیفیت انجام آزمایش های مختلف در بخش پاتولوژی، در همه نوبت های کاری و تفسیر نتایج آن ها		
شماره ویرایش : پنجم	تاریخ بازنگری : آبان ماه 1401	تاریخ ابلاغ : آذر ماه 1401	تاریخ تدوین : 95/8/10

گامهای دقیق انجام عملیات (حالت افعال به کار برده شده امری (دوم شخص جمع) باشد جملات ساده - کوتاه - مختصر) :

الف) تحویل نمونه:

1. کنترل کیفیت و کمیت مایع فیکساتیو توسط مسئول پذیرش
2. کنترل تناسب ظرف با حجم نمونه توسط مسئول پذیرش
3. کنترل نحوه نمونه برداری، مدت زمان ارسال نمونه، حجم نمونه و آلودگی احتمالی نمونه های سیتولوژی توسط مسئول پذیرش
4. کنترل مشخصات ثبت شده روی ظرف با برگه درخواست توسط مسئول پذیرش
5. کنترل برگه در خواست از نظر نوع درخواست پزشک، وجود اطلاعات بالینی و سابقه بیمار توسط مسئول پذیرش

ب) آماده سازی بافت:

1. کنترل تمیزی وسایل پاس و بسکت برای جلوگیری از انتقال بافتی بین نمونه ها توسط مسئول پاس
2. کنترل محلول های دستگاه تیشوپروسور و نیز صحت کارکرد دستگاه توسط اپراتور
3. کنترل صحت شماره گذاری بلوک ها توسط مسئول پاس و پزشک

ج) تعبیه لام:

1. کنترل مایع تیشو فلوت از نظر دما و آلوده نبودن توسط اپراتور
2. کنترل دستگاه برش از نظر سالم بودن تیغ، عدم آلودگی و ضخامت برش ها توسط اپراتور
3. کنترل کیفیت پرافین و صحت عملکرد و دمای دستگاه پرافین دیس پنسر توسط اپراتور
4. کنترل دمای فور توسط اپراتور
5. کنترل زمان و سرعت پرخش سانتریفیوژ

د) رنگ آمیزی:

1. کنترل کیفیت رنگ ها، الکل و گزیلول توسط اپراتور
2. کنترل کیفیت چسب توسط اپراتور
3. کنترل لام های تهیه شده از نظر کیفیت رنگ، ضخامت برشی وجود هوا و لام گذاری توسط پزشک و اپراتور مربوطه

ی) گزارش:

1. مطابقت برگه درخواست با لام ها توسط پزشک
2. کنترل جواب پرینت شده و مطابقت با درخواست توسط پزشک

منابع: تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی دکتر محمدرضا عابدی

امکانات مرتبط: لام های قبلی به عنوان نمونه شاهد

کارکنان مرتبط: کارکنان پاتولوژی

نام و نام خانوادگی و سمت تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده:	نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:		
دکتر امیراحمد عرب زاده رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل	دکتر علیرضا خلیلی مسئول فنی پاتولوژی	سهیلا دانش کارشناس آزمایشگاه	دکتر علیرضا خلیلی مسئول فنی پاتولوژی	محمد حسین آقاجانی مسئول آزمایشگاه
			سمایه کیانی مسئول بخش پاتولوژی	مریم محسنی کارشناس آزمایشگاه