

دستورالعمل (Instruction)

کد سند : INS-LAB-12	عنوان دستورالعمل : نحوه کنترل کیفیت انجام آزمایش های مختلف در بخش ایمنولوژی و هورمون، در همه نوبت های کاری و تفسیر نتایج آن ها		
شماره ویرایش : پنجم	تاریخ بازنگری : آبان ماه 1401	تاریخ ابلاغ : آذر ماه 1401	تاریخ تدوین : 95/8/10

گامهای دقیق انجام عملیات (حالت افعال به کار برده شده امری (دوم شخص جمع) باشد جملات ساده - کوتاه - مختصر) :

کنترل کیفی را در تمامی شیفتها و در هر ران کاری انجام و طبق دستورالعمل اقدام کنید .

- 1) در برنامه ارزیابی خارجی کیفی و تفسیر نتایج و شناسایی خطاها شرکت کنید و اقدام مقتضی جهت رفع مشکلات و بایگانی آن بعمل آورید.
- 2) از کنترلها و کالیبراتورهای هر کیت استفاده نمایید و نمودار برای هر تست در هر ران کاری ایجاد کنید.
- 3) پس از اتمام کار و آماده شدن جوابهای کنترل ، نتایج را در نمودار مربوطه قرار داده و با استفاده از قوانین وستگارد تفسیر نمایید.
- 4) در صورتی که طبق قوانین وستگارد مشکلی وجود داشته باشد طبق SOP مربوطه عمل کرده و تا حذف اشکال و تنظیم دستگاه ادامه دهید .
- 5) نتایج کنترل را در برگه مخصوص ثبت و بایگانی کنید.

منابع: تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی دکتر محمدرضا عابدی

امکانات مرتبط : نمونه های کنترل فرم های کنترل کیفی

کارکنان مرتبط : کارکنان بخش ایمنولوژی و هورمون

نام و نام خانوادگی و سمت تصویب کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان :		
دکتر امیراحمد عرب زاده رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه	سیامک رجبی کارشناس آزمایشگاه	محمد حسین آقاجانی مسئول آزمایشگاه	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه
				افسانه بابازاده کارشناس آزمایشگاه