

دستورالعمل (Instruction)

عنوان دستورالعمل : چگونگی جمع آوری و ارسال نمونه ها از مراکز خارج از آزمایشگاه			
کد سند : INS-LAB-10			
تاریخ تدوین : 95/8/10	تاریخ ابلاغ : آذر ماه 1401	تاریخ بازنگری : آبان ماه 1401	شماره ویرایش : پنجم

گامهای دقیق انجام عملیات (حالت افعال به کار برده شده امری (دوم شخص جمع) باشد جملات ساده - کوتاه - مختصر) :

- الف- شرایطی که نمونه ارسالی مناسب و قابل پذیرش می باشد:
 - رعایت ناشتایی و مصرف دارویی (برچسب نوع نمونه و درخواست پزشک)
 - تطابق برگه درخواست کامپیوتری نمونه مورد آزمایش با لیبل روی نمونه (نام- نام خانوادگی- نام پدر- شماره پذیرش- تاریخ و زمان)
 - حجم کافی نمونه ارسالی با توجه به تعداد آزمایشات درخواستی
 - رعایت تهیه و نحوه نقل و انتقال نمونه طبق استاندارد تعریف شده.
 - نمونه باید عاری از همولیز و در صورت استاندارد از ضد انعقاد عاری از لخته و بدون لیپمیک شدید باشد.
 - ب- شرایط نمونه های نامناسب و غیر قابل پذیرش:
 - عدم رعایت ناشتایی (در صورت درخواست ناشتا بودن) و مصرف دارویی
 - عدم تطابق لیبل لوله با برگه درخواست آزمایش
 - ناکافی بودن حجم نمونه
 - نمونه های بی نام یا نام غلط و ناخوانا
 - ظروف و لوله نامناسب
 - نمونه های دارای نشت و آلودگی
 - عدم رعایت موارد استاندارد در نقل و انتقال نمونه ها
 - نمونه همولیز و لیپمیک شدید
 - عدم تطابق نوع نمونه با نوع آزمایشات
 - وجود لخته در تست های انعقادی و هماتولوژی (نبود ضد انعقاد)
 - برای بیماران بستری:
1. آزمایش های مورد نیاز ابتدا از طریق HIS درخواست میشود.
 2. سپس پرستاران بخش طبق دستورالعمل نمونه های لازم را اخذ و به آزمایشگاه ارسال می نمایند.
 3. نمونه ها در بخش تحویل نمونه آزمایشگاه از نظر کیفیت ، کمیت کنترل و به صورت دیجیتالی نمونه گیری می گردد.
 4. نمونه ها به بخش مربوطه بسته به نوع آزمایش تحویل میشود.

منابع: تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی دکتر محمدرضا عابدی

امکانات مرتبط: جعبه های حمل نمونه

کارکنان مرتبط: پرستاران بخشها

نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:			نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده:	نام و نام خانوادگی و سمت تصویب کننده:
محمد حسین آقاجانی مسئول آزمایشگاه	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه	فریبا ابراهیمی کارشناس آزمایشگاه	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه	دکتر امیراحمد عرب زاده رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل
رامین رونقی مدیر خدمات پرستاری مرکز	شهین شیفته سوپروایزر بالینی	فرهاد محمد نژاد سرپرستار		
فریبا بختیاری سرپرستار				