

دستورالعمل (Instruction)

کد سند : INS-LAB-5	عنوان دستورالعمل : نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه انگل شناسی انجام می شود.		
شماره ویرایش : پنجم	تاریخ بازنگری : آبان ماه 1401	تاریخ ابلاغ : آذر ماه 1401	تاریخ تدوین : 95/8/10

گامهای دقیق انجام عملیات (حالت افعال به کار برده شده امری (دوم شخص جمع) باشد جملات ساده - کوتاه - مختصر) :

انگل شناسی :

شیفت صبح روزهای غیر تعطیل :

آزمایشات انگل شناسی را بر اساس لیست کاری اخذ شده از نرم افزار و نمونه های موجود انجام دهید و گزارش نتایج آزمایشات را ارائه نمایید.

- 1) در بخش انگل شناسی آزمایشات S/E-OB-S/C نمونه ها را برحسب درخواست طبق دستورالعملها انجام دهید .
- 2) آزمایش SE را به روش مستقیم با استفاده از سرم فیزیولوژی و میکروسکوپ با دید مستقیم گزارش کنید
- 3) جهت گزارش بهتر تخم انگل از روش فلوتاسیون یا رنگ لوگول استفاده کنید.
- 4) جهت آزمایش OB از کیت مخصوص تشخیصی موجود طبق دستورالعمل شرکت سازنده اقدام کنید .
- 5) جهت آزمایش SC از محیط SF استفاده کرده و بقیه مراحل آزمایش توسط مسئول بخش میکروب پیگیری شود .

شیفت صبح روزهای تعطیل و شیفتهای عصر و شب :

مسئول انجام آزمایشات بر حسب لیست کاری اخذ شده از نرم افزار و نمونه های موجود طبق دستورالعمل انجام و نتایج آزمایشات درخواست شده را گزارش نمایید.

منابع : دستورالعمل کیت - کتاب انگل شناسی اورمزدی

امکانات مرتبط: میکروسکوپ - لام - لامل - سرم فیزیولوژی - کیت OB - اپلیکاتور - رنگ لوگول

کارکنان مرتبط : کارشناسان بخش انگل شناسی

نام و نام خانوادگی و سمت تصویب کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان :		
دکتر امیراحمد عرب زاده رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه	لیلا اسدی مسئول بخش میکروب شناسی	محمدحسین آقاجانی مسئول آزمایشگاه